

# Severo elektrisk Pilleknuser v3.1

## Manual!

Et effektivt redskab i forbindelse med medicin håndtering

Severo elektriske pilleknuser er et enkelt og effektivt redskab til knusning af piller/tabletter. Pillerne knuses på 8 sekunder til et fint pulver.

Severo pilleknuser knuser medicinen direkte ned i det medicinbæger, der skal anvendes ved patienten, og tabletterne kan efter knusning også let dispenseres via en tynd ventrikelsonde. Ved arbejdsprocessen går der ikke noget medicin tabt, så den doserede medicin gives korrekt.

Knusning af piller/tabletter sker i et lukket system, så der ikke sker forurening til miljøet. Herved undgås risiko for inhalation af medicinstøv og hudkontakt med medicinen. De enkelte dele af pilleknuseren kommer ikke i berøring med den medicin, der bearbejdes, så pilleknuseren er efter knusning af piller/tabletter straks klar til bearbejdning af medicinen til næste patient uden forsinkende rengøring.

Brugen af Severo pilleknuser er enkel:

1. Anbring pillerne i et medicinbæger (**Ikke for mange ad gangen**).
2. Sæt medicinbægeret i pilleknuseren.
3. Anbring plastikrondel oven på medicinbægeret (forhindrer støv til miljøet og undgår kontakt med pilleknuserens stempel).
4. Luk plastikrondellen med metalstemplet ned i medicinbægeret.
5. Luk låget på pilleknuseren (pilleknuseren begynder automatisk at arbejde og er færdig på 8 sekunder).
6. **Løft først låget når maskinen er færdig med at køre programmet, metalstemplet skal være helt i bund** og tag medicinbægeret ud med de knuste piller (Pilleknuseren er nu klar til næste forarbejdning af piller).

Severo tabletknuser er en yderst effektiv måde at knuse tabletter på uden risiko for overbelastning af brugerens hånd og arm.

Manuel knusning af piller gentagne gange kan betyde stor belastning af specielt hænder og håndled.

Severo pilleknuser er udført i et lille og bærbart design og har et indbygget genopladeligt batteri, så den kan anvendes uafhængig af adgang til strøm.

Arbejdsprocessen er støjsvag (52dB).



STETOSKOP.DK

*...meget mere end stetoskoper*