



Først drejer du hovedet af otoskopet.



Derefter skrues du den lille skrue ud, med en skruetrækker. Jeg brugte en på 2 mm.

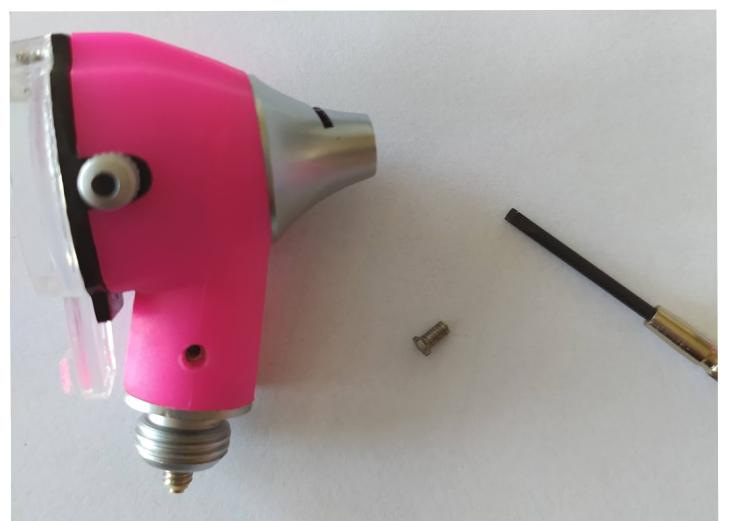

Nu kan du hive "kammeret" ud med pæren i.

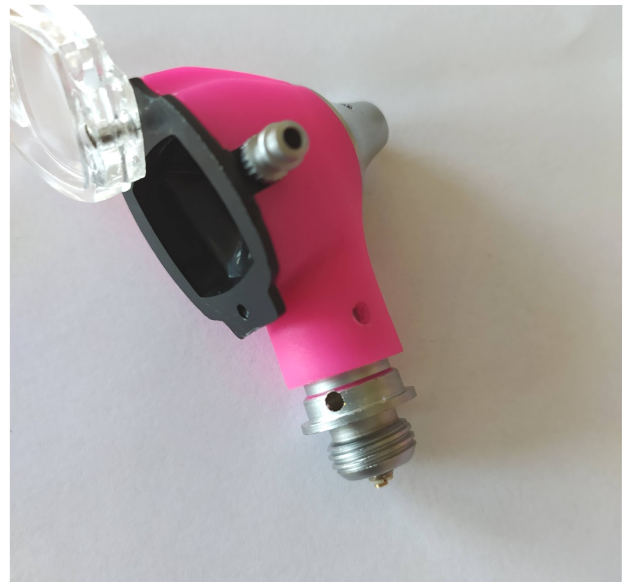

Gør det forsigtigt.



Der er en lille kugle og fjeder som springer ud. Disse to er vigtige, for at pæren sidder ordentligt i.



Nu kan du tage pæren ud. OBS du må ikke røre ved pæren med fedtede fingre.

Nu gør du det hele omvendt, for at sætte den nye pære i.

