

Kay Picture Test SINGLE Crowded Book

KPTSINGLE

Instruktioner:

Kay Picture Test Linear Crowded Book screener synet hos børn fra ca 18 måneder eller så snart, at barnet har sprog til det eller forstår at vise en figur, det ser. Billeder vises i forskellige størrelser fra 1,0 - -0,1, og testen gennemføres med en afstand på 3 meter til barnet.

Generelt:

Vær omhyggelig med at måle testafstanden på 3 meter præcist.

Sørg for en god belysning.

Skab et trygt rum for barnet.

Fremgangsmåde:

Vis barnet de seks billeder på de matchende kort, og spørg barnet, om det kan navngive dem. Alternativt kan I øve på, at det kan matche billederne ved at pege.

Dæk det venstre øje med et dækkende plaster eller dækkende briller. Vær sikker på at dækningen holder under hele undersøgelsen.

Sæt dig 3 meter fra barnet. Åben bogen forfra og brug din højre tommelfinger til at vælge den størrelse, du vil vise barnet. Vend bogen rundt og vis barnet siden. I øverste venstre hjørne står størrelsen og billedet, du viser barnet, så du kan checke det.

Spørg barnet, om at sige eller vise billedet på sin egen plade.

Gentag indtil du når du når en størrelse på billedet, som barnet ikke kan læse. Prøv gerne med andre billeder i samme størrelse for at være sikker.

Hvis det er muligt, testes barnets syn på det fastlagte niveau ved at vise 5 billeder – de 4 forskellige og en gentagelse. Beregn en score på 0,02 per billede, som barnet **ikke** kan se, og læg den til scoren for niveauet. Det betyder, at på niveau 0,1 hvor barnet ikke kan se 2 billeder, bliver scoren $0,1+0,02+0,02 = 0,14$

Når du skal teste det venstre øje, dækkes højre øje, og bogen vendes, så du åbner den bagfra og herefter gentages undersøgelsen.

Registrerede resultater:

Alle 5 billeder i en række har en score på 0,2. For at opnå sikreste testresultat, bør 2 eller 3 linier i nærheden af barnets synsstyrke vises

Snellen

Snellen størrelserne i meter (og feet) kan aflæses på de enkelte sider.

Hvis du bruger Snellen metoden, registres rækkerne, som kan ses/ikke kan ses ved tilføjelse af + eller - efter Snellen angivelsen.

LogMar

Aflæs LogMar scoren mellem 1 og -0,1 på den enkelte side.