

Bortskaffelse og genbrug



Evans Synstavle er fremstillet vha miljøvenlige materialer, hvor det er muligt. Evans anbefaler, at udstyret så vidt muligt adskilles til genbrugsformål. Elektriske dele og kabler skal bortskaffes som elektrisk affald i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Erklæring om alvorlig hændelse

Rapportér venligst omgående enhver alvorlig hændelse, der involverer dette produkt tilbage til Evans (Instruments) Limited, samtidig med til den aktuelle myndighed i dit land (MHRA i Storbritannien).



Evans (Instruments) Limited
35 Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ
Tel: 01842 766004
e: sales@evansinstruments.co.uk
www: evansinstruments.co.uk



VeriSafe Compliance Limited
77 Lower Camden Street, Dublin, Ireland, DO2 XE80



Synskasse til 1 tavle



Produktinformation

Issue Date : 18/07/2023

Specifikationer:

Model: 900(6)
Farve: Hvid

Dimensioner: Udpakket / pakket

Højde: 525/640 mm
Bredde: 210/270 mm
Dybde: 52/110 mm
Vægt: 1,5/2,3kg

Elektrisk: (strømforsyningsenhed)

EN60601-1: godkendt
Indgang: 100-240v/AC, 50-60Hz, 160-80mA
Udgang (til Evans enhed): 12v/DC, 600mA, 7,2w

LED Strip (12V)
Ledningslængde: 2 meter (indgang på højre side)

Reserve dele:

Beskrivelse:	Reservedelsnummer:
Neo 6, 12v Medical Plug	EDV1960970EVANS

Rengøringsvejledning:

Afbryd stikkontakten!

Denne enhed kan rengøres ved at tørre af med en fugtig klud og en svag opløsning af vaske-/desinfektionsmiddel. Bemærk venligst, alkoholbaserede rengøringsvæsker bør IKKE bruges.

Brugerbetingelser:

Er kun til indendørs brug og skal beskyttes mod fugt.
Dette produkt er lavet til sundhedsfagligt brug.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for uheld, der opstår efter installation af produktet.

Brugsanvisning

Efter montering af synstavlen i den ønskede position:
Strømadapteren, der følger med enheden, skal tilsluttes en stikkontakt i væggen.
Indgangsstikket sættes i stikkontakten i nederste højre side af synstavlen.
Panel/spot-kontakten kan nu betjenes for at vælge den ønskede belyste sektion.
Hvis en anden tavle er påkrævet, skal du slukke for strømmen og skubbe tavlen op for at fjerne den fra synstavlen.
Udskiftning af LED båndene bør ikke være nødvendige i 30-50.000 timer. Enheden skal returneres til Evans (Instruments) Limited for at montere nye LED-strips.


Garanti


Hvis dette produkt bliver defekt på grund af defekte materialer og udførelse, inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer vi enten at udskifte alle defekte dele (med undtagelse af LED'er) eller, efter vores skøn, at udskifte enheden gratis, forudsat at:


- Produktet returneres til os eller vores autoriserede reparatører med dokumentation for dato for køb;
- Produktet har ikke været udsat for misbrug eller forsømmelse;
- Produktet er ikke blevet beskadiget gennem fremmedlegemer, stoffer eller ulykker;
- Reparationer er ikke blevet forsøgt af andre end vores eget servicepersonale eller autoriserede reparationsforhandlere.


Denne garanti tilbydes som en ekstra fordel og er et supplement til kundens lovbestemte rettigheder.


Symboler


 Medicinsk udstyr.

 Class II udstyr.


 Betjeningsvejledning medfølger.


 CE-mærket på dette produkt angiver, at det er blevet testet og er i overensstemmelse med bestemmelser noteret i forordningen om medicinsk udstyr (EU)2017/745.


 UKCA-mærket på dette produkt angiver, at det er blevet testet og er i overensstemmelse med bestemmelser noteret i UK Medical Device Regulations 2002


 Symbolet vedtaget af Det Europæiske Råd for at repræsentere elektrisk affald og elektronisk udstyr består af en overstreget skraldespand med eller uden en enkelt sort streg under symbolet. Den sorte linje angiver, at varer er blevet markedsført efter 2005, hvor direktivet trådte i kraft.

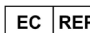
 Advarsel.

 Enhedens serienummer.

 Katalognummer.

 Fremstillingsdato.

 Producentoplysninger.

 Europæisk autoriseret repræsentant.

