

# **Skarpske**

Gældende for varenumre: 10038, 10039, 10040, 10041

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

**Anvendelse:** En skarpske bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

**Tilsligtet anvendelse af instrumentet:** Anvendes til fx revidering af sår eller til udtagning af biopsier. Findes i forskellige størrelser.

**Uegnet brug / kontraindikation af produktet:** Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

**Betjening af skarpskeer:** En skarpske er et skærende instrument, der er udformet som en ske. En skarpske har et knivskarpt skehoved, der anvendes til at fjerne væv ved kirurgi.

**Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring:** Når det bruges og opbevares korrekt, vil dette produkt holde i mange år.

**Garanti:** Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

## **Instruktioner:**

**Opbevaring og transport:** Ingen specielle krav.

**Rengøring:** Tør skarpskeen af med en fugtig klud eller et overfladerensemiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

**Desinfektion:** Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Desinfektion er det første trin, der skal udføres ved rengøring af forurenede genstande og materialer. Målet her er at reducere antallet af mikroorganismer og lette den efterfølgende rengøringsproces. Det er meget vigtigt at forhindre urenheder i at tørre på instrumentet / materialet. Desinficeringsprocessen tjener også til at beskytte personalet, mens det håndterer instrumenterne,

såvel som det omgivende miljø. Denne valgte desinficeringsproces skal om muligt udføres direkte på det sted, hvor instrumenterne blev brugt, og så hurtigt som muligt efter brug.

**Sterilisering:** Kan steriliseres i en autoklave.

**Vedligeholdelse:** Produktet behøver ikke jævnlig vedligeholdelse. Fjern og udskift altid beskadigede dele.

**Inspektions- og funktionstest:** Undersøg visuelt for skader og slid. Før brug skal du sikre dig, at produktet.

**Emballage:** Skarpskeerne er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

**Opbevaring:** Opbevares i et rent, tørt lokale med jævn temperatur. Produktet beskyttes skal beskyttes mod direkte sollys.

**Bortskaffelse:** Bortskaf altid efter lokale bestemmelser.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse