

## **Varenavn Derma Curette**

Gældende for varenumre: 22602, 22603, 22604, 22605, 22606

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

**Anvendelse:** Disse curetter bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

**Tilsigtet anvendelse af instrumentet:** En curette er et kirurgisk instrument til at afskrabe eller fjerne væv eller affald ved en biopsi, bortskæring eller rensningsprocedure. Til engangsbrug.

**Uegnet brug / kontraindikation af produktet:** Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

**Betjening af produktet:** Enheden er lavet af en ring i rustfrit stål i den ene ende og et polypropylen håndtag i den anden ende. Curetterne findes i forskellige størrelser og størrelsen er præget på siden af håndtaget.

**Garanti:** Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

### **Instruktioner:**

**Opbevaring og transport:** Ingen specielle krav

**Rengøring:** Curetten er pakket sterilt ved modtagelse og er kun til engangsbrug.

**Desinfektion:** Curetten er pakket sterilt ved modtagelse og er kun til engangsbrug.

**Sterilisering:** Curetten er pakket sterilt ved modtagelse og er kun til engangsbrug.

**Vedligeholdelse:** ingen, produktet er kun til engangsbrug

**Inspektions- og funktionstest:** Hvis der er tegn på brud på den sterile pakning, skal produktet kasseres. Efterse produktet efter udpakning. Hvis der er tegn på fejl skal produktet kasseres.

**Emballage:** Curetterne er pakket individuelt i en steril engangsemballage

**Opbevaring:** Ingen særlige krav

**Bortskaffelse:** Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse